


ІНСТРУКЦІЯ

Захисна маска-екран для обличчя


Комплектація: тримач та змінні екрани (кількість згідно замовлення)

Спосіб зібрання:

- 1) Зняти захисну плівку з обох сторін екрану
- 2) Язик (1) з'єднати з витвором (2) на тримаче знизу вгору (див. мал. 1)
- 3) Язики (3) і (4) вигнути та з'єднати з витворами (5) та (6), (див. мал.1)
- 4) Замкнути захисний екран у витворах (5) та (6) потягнувши екран донизу (приклад замкнутого екрану див мал.2)
- 5) Вдягнути захисну маску на голову поверх медичного капелюху і відрегулювати по розміру (регулюючи зажими) та зав'язати.

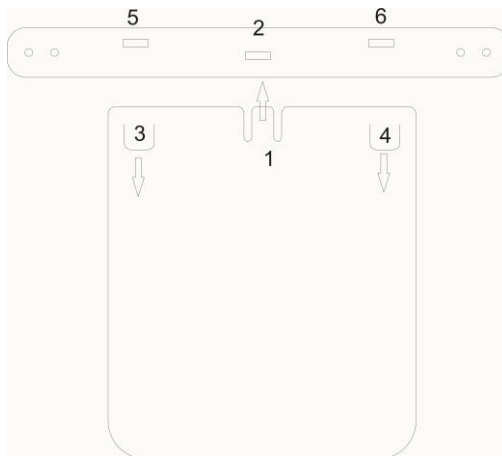

Мал. 1

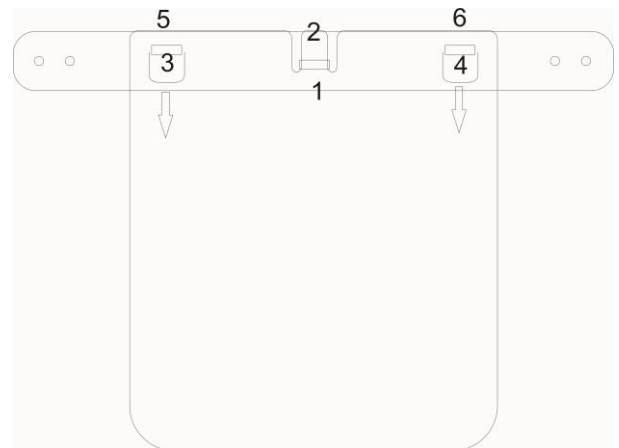

Мал. 2

Рекомендації щодо дезінфекції:

- 1) Захисні екрани рекомендовано змінювати кожні 3 години, оброблюючи змінну частину м'якою тканиною з дезінфікуючим засобом.
- 2) Не нагрівати (дезінфікувати) вироб при температурі вище ніж 60С, щоб не деформувати пластик.
- 3) Не тримати змінні екрани поруч з металевими та гострими предметами, щоб не пошкодити поверхню.
- 4) Вироб не можна дезінфікувати у мікрохвильовій печі.